



ZooTek
動心醫電

智慧健康保暖衣

Intelligent Heating Garment

使用手冊



保暖衣外觀



保暖衣電源



附註：

- 行動電源請消費者自行選購

保暖衣App畫面介紹

App畫面示意圖



附註：

- 本圖可搭配後續功能說明進行閱讀。
- 本App目前僅支援Android系統。

保暖衣App連線說明

App操作步驟

1.



按下連線鍵

2.



點選 ZoeC1

3. 回到App主頁，表示連線成功。

功能1：三段式智慧溫控

手動操作介紹



按壓第一次顯示綠燈 40°C



按壓第二次顯示藍燈 45°C



按壓第三次顯示紅燈 50°C

※ 若顯示白燈號顯示代表待機運作未啟動功能

App操作步驟

1.



按下溫控鍵

2. 進入App次頁



選擇溫度

功能2：計步量測

App操作步驟

1.



按下計步鍵

2. 進入App次頁



按下步數鍵
開始計步

3.



計步量測數值

4.



讀取之前累積
計步數值

清除計步數值

功能3：定位量測

App操作步驟

1.



2. App顯示

顯示與設定求救名單中衣服的距離			停止偵測
編號	姓名	衣服位址	距離
1.	王先生	E9:51:3F:70:3A:CD	6.24m

功能4：跌倒自動偵測

1. 當保暖衣穿著者發生跌倒時，App將自動彈出警示畫面，若**5秒內**無取消則發射求救簡訊。



功能4：緊急求救

手動操作介紹

1.



穿著者長按10秒紅燈閃爍代表
啟動緊急求救功能

2.



當緊急求救功能啟動，紅燈將不會熄滅，代表鎖定求救功能。使用手機App取消求救顯示紅燈才會熄滅。

App
即時
反應

App操作步驟

1. 點選 **有** 字取消求救

使用者姓名在聯絡人編輯中設定;
求救欄顯示是否發出求救, 若要清除請配對該衣服再點選.

姓名	衣服位址	聯絡人	求救
Kevin	E9:51:3F:70:3A:CD	編輯	有

2. 求救訊息恢復為 **無**

使用者姓名在聯絡人編輯中設定;
求救欄顯示是否發出求救, 若要清除請配對該衣服再點選.

姓名	衣服位址	聯絡人	求救
Kevin	E9:51:3F:70:3A:CD	編輯	無